

# PRUEBA ANTIDOPING CASERA

## INSTRUCTIVO DE USO


### PRUEBA DE PANEL MULTIDROGA

1.




Coloque la muestra de orina en el vaso esterilizado *(se recomienda no llenar el vaso para evitar derrames)*.

2.

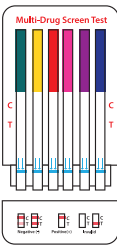


Retire el empaque de la muestra y retire la tapa plástica que cubre las tiras reactivas.

3.

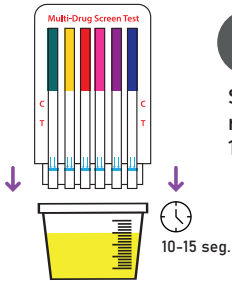

Sumerja únicamente las tiras reactivas en la muestra de orina por 10-15 segundos.

4.

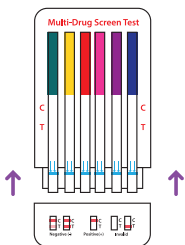

Retire la prueba de la muestra, vuelva a colocar la tapa, y deposite el panel sobre una superficie plana no absorbente. Espere 5 minutos para interpretar los resultados. **No interprete después de 10 minutos.**

Los parámetros de detección de drogas para su prueba antidoping *(según los que indique)* son:

THC = Marihuana  
COC = Cocaína  
AMP = Anfetamina  
MET = Metanfetamina  
OPI = Opiáceos  
BZO = Benzodiazepinas

### LECTURA DE RESULTADOS POR TIRA

Cualquiera de las dos opciones



NEGATIVO



POSITIVO

Cualquiera de las dos opciones



INVÁLIDO

*\*En caso de que un resultado sea positivo, conserve la muestra de orina, y envíe a un laboratorio clínico para realizar una prueba confirmatoria.*

### IMPORTANTE

*Esta prueba no distingue entre drogas de abuso y medicamentos controlados. Un resultado positivo se puede obtener de ciertos medicamentos y/o suplementos alimenticios.*

*Consulte con el sujeto de prueba si está tomando alguno de éstos antes de realizar la prueba antidoping.*



Escanea el código para acceder al video explicativo de uso de las pruebas.



La prevención es responsabilidad de todos, conoce más de como cuidar a tu familia en: [www.provisiongroup.mx/prevee](http://www.provisiongroup.mx/prevee)